


超音波画像診断装置

**SONO****N**

Windows 版 アプリ  
インストールマニュアル


# SONON Windows版アプリ インストールマニュアル

1. 下記URLをクリック  
<https://distribute.healcerion.com/sononx/release/>
2. アプリ一覧の中から、  
Download Windows Installer (CE) をクリック

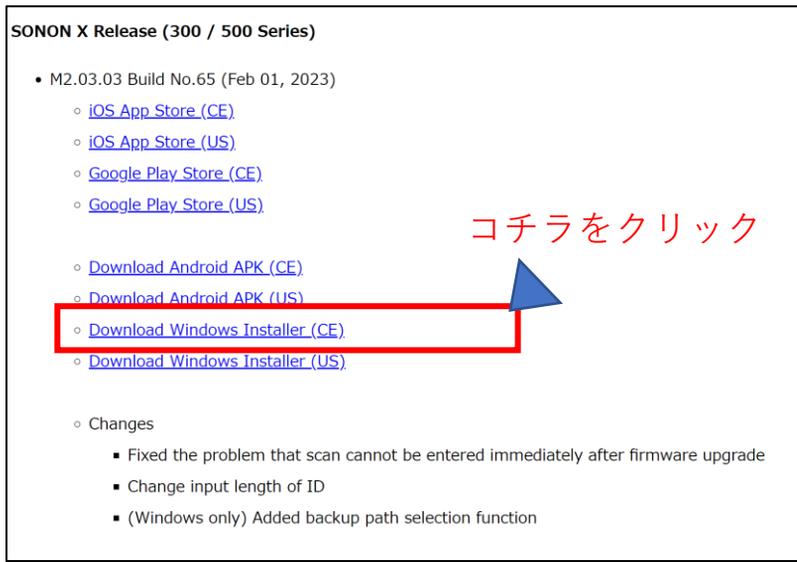


※ダウンロードしたファイルの保存先は、PCにより異なります。

3. ダウンロードしたファイルをクリック

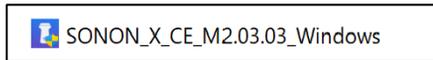


4. セキュリティがかかった場合、下記手順でインストールします

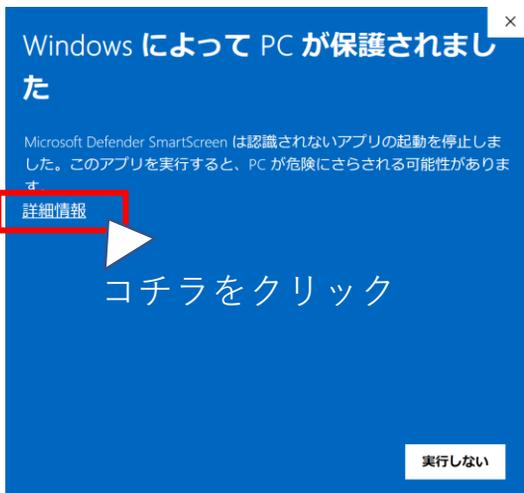

## SONON Windows版アプリ インストールマニュアル

5. 「この不明な発行元からのアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか」メッセージが表示されたら「はい」をクリック
6. インストールウィザードが表示されたら、「Install」をクリック

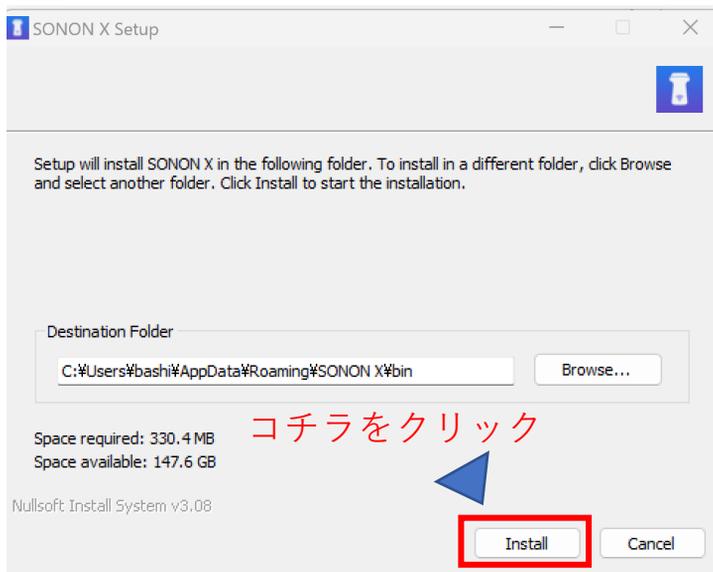

7. インストールが完了したら、「Close」をクリックしてインストール完了です。

